


CareSens® Air alkalmazás használata Dcont® ETALON B vércukormérővel




A CareSens® Air alkalmazás lehetővé teszi a Bluetooth funkcióval rendelkező Dcont® ETALON B vércukormérő csatlakoztatását, így a mért értékek automatikus feltöltését.

Dcont® ETALON B vércukormérő csatlakoztatása:

1. A CareSens Air alkalmazás Beállítások menüjében koppintson a **Vércukormérő** gombra.

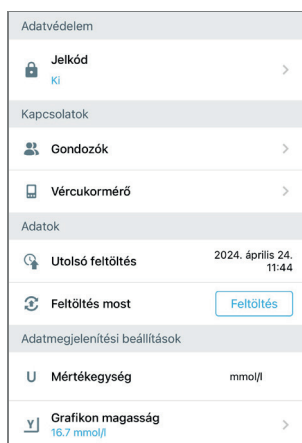

2. Koppintson a jobb felső sarokban lévő  ikonra.

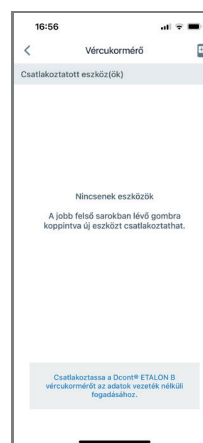


3. Győződjön meg róla, hogy a vércukormérőn a Bluetooth funkció be van kapcsolva, majd koppintson a **Keresés** gombra.



4. A keresési művelet elindul.



5. Az Elérhető eszközök listájából koppintson a csatlakoztatni kívánt vércukormérőre.

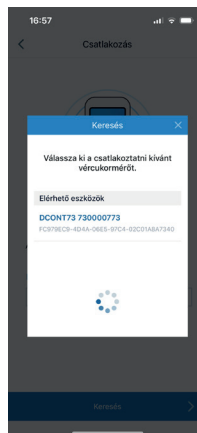

6. A Csatlakoztatott eszközök listájában megjelenik a kívánt vércukormérő.



CareSens® Air alkalmazás használata Dcont® ETALON B vércukormérővel




Dcont® ETALON B vércukormérővel mért értékek megjelenítése a CareSens® Air alkalmazásban:

1. A mért érték megjelenése után az azonnali küldéshez nyomja meg a vércukormérőn a középső gombot ① vagy a készülék kikapcsolásakor automatikusan elküldésre kerül.

2. Az érték megjelenik az alkalmazás adatátviteli felületén.

3. Az "Étkezés" oszlopban ▼ ikonra koppintva kiválasztható az anyagcsere állapot a mérés pillanatában. Koppintson a **Küldés most** gombra.

4. A vércukormérés az alkalmazásban eseményként rögzítésre kerül. A **Rendben** gombra koppintva lépjen ki erről a felületről.

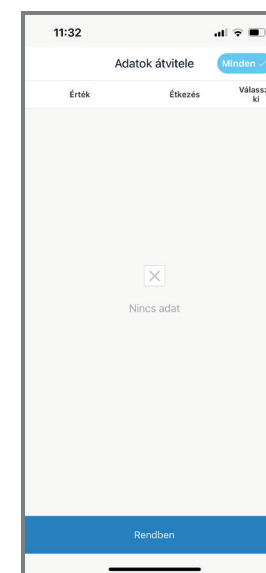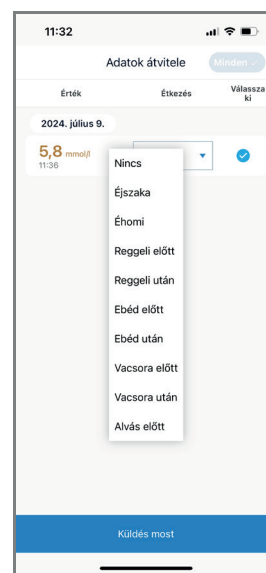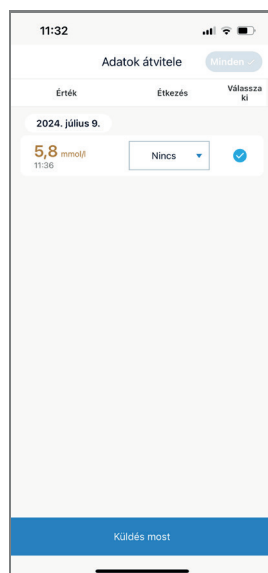

E-mail: cgms@e77.hu

Ügyfélszolgálat: +36 80 880 077



cgms.hu

Lezárás dátuma: 2024.07.10.

A termék gyógyászati segédeszköz.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.